

Močový sediment dle Hamburgera

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření			
			platí od: 1.1.2021
MOČOVÝ SEDIMENT DLE HAMBURGERA			MSH
Biologický materiál	moč sbírat přesně 3 hodiny, vždy uvést přesnou dobu sběru	Dostupnost	statim: do 1 hod rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	moč – plastová zkumavka (žlutý uzávěr)	Nejistota	
Použitá metoda	mikroskopické vyšetření	Jednotka	počet elementů za min.
Referenční meze	moč		
	erythrocyty	0-2000 elementů/min	
	leukocyty	0-4000 elementů/min	
	válce	0-60 elementů/min	
SOP	SOPV 221		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
81325	08512, 08518, 03296, 03356		
Poznámka	Dodržet přesně dobu sběru. Pokud dodáváme pouze vzorek, dobře promíchat a přesně změřit, objem u dospělých nemá být menší než 100 ml.		
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta	Moč sbíráme po úplném vyprázdnění močového měchýře.		
Vliv materiálu			
Stabilita při 20°C	2 hodiny po skončení sběru		
Stabilita při 4-8°C	-		

Stabilita při -20°C	-
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	<p><u>hodnoty snižuje:</u> delší skladování, kontaminace, dezinfekční prostředky, nedodání veškeré moče, nedodržení doby sběru, uvedení většího objemu, než je skutečnost</p> <p><u>hodnoty zvyšuje:</u> uvedení kratší doby sběru nebo menšího objemu, než je ve skutečnosti</p>
Biologický poločas	